

Merci de lire cette fiche entièrement avant la ponction

Docteur,

Vous allez réaliser une ponction de liquide articulaire chez votre patient.

Afin de pallier à d'éventuelles altérations liées à une transmission tardive du prélèvement, nous vous mettons à disposition des kits.

Ces kits comprennent un tube sec (bouchon rouge), un tube héparinate de sodium (bouchon vert) et 2 flacons d'hémoculture, voici comment les utiliser :

Indiquez les **nom, prénom, date de naissance, date et heure de recueil** sur les deux tubes et les flacons.



1. Désinfecter les bouchons des deux tubes et des flacons à l'alcool à 70° ou à la Chlorhexidine.
2. Une fois votre prélèvement fait, décharger votre seringue dans ces trois/quatre récipients en respectant l'ordre suivant :
 - ❶ Tube sec à bouchon rouge
 - ❷ Tube héparinate de sodium à bouchon vert
 - ❸ Flacon d'hémoculture. Si le volume d'échantillon ne permet pas d'ensemencer les 2 flacons, ensemencer uniquement le flacon à étiquette verte.
3. Placer ces trois/quatre récipients dans la grande poche du sachet de transport et la sceller
4. Merci de noter les informations cliniques suivantes sur l'ordonnance :
 - Localisation du prélèvement
 - Traitement antibiotique récent, en cours ou à venir
 - Contexte clinique

Merci de préciser au patient de **rapporter le prélèvement le plus rapidement possible** au laboratoire.

Reproduction de tout ou partie interdite, sans l'autorisation préalable de la cellule qualité Biofutur.