



Merci de lire cette fiche entièrement avant la ponction

Docteur,

Vous allez réaliser une ponction de liquide articulaire chez votre patient.

Afin de pallier les éventuelles altérations liées à une transmission tardive du prélèvement, nous vous mettons à disposition des kits.

Ces kits comprennent un tube sec (bouchon rouge), un tube héparinate de sodium (bouchon vert) et 2 flacons d'hémoculture, voici comment les utiliser :

Indiquez les nom, prénom, date de naissance, date et heure de recueil sur les deux tubes et les flacons.



1. Désinfecter les bouchons des deux tubes et des flacons à l'alcool à 70° ou à la Chlorhexidine à 2%.
2. Une fois votre prélèvement fait, décharger votre seringue dans ces trois/quatre récipients en respectant l'ordre suivant :
 - 1 Tube sec à bouchon rouge
 - 2 Tube héparinate de sodium à bouchon vert
 - 3 Flacon d'hémoculture. Si le volume d'échantillon ne permet pas d'ensemencer les 2 flacons, ensemencer uniquement le flacon à étiquette verte.
3. Placer ces trois/quatre récipients dans la grande poche du sachet de transport et la sceller
4. Merci de noter les informations cliniques suivantes sur l'ordonnance :
 - Localisation du prélèvement
 - Traitement antibiotique récent, en cours ou à venir
 - Contexte clinique

Merci de préciser au patient de rapporter le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire.

Reproduction de tout ou partie interdite, sans l'autorisation préalable de la cellule qualité Biofutur.